

hhp Andullationstherapie-System

DAS MASSAGESYSTEM FÜR PFERDE – BEDIENUNGSANLEITUNG

Entnehmen Sie das Massagesystem der Transporttasche. Laden Sie den mitgelieferten Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie hierfür ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät. Die Diode am Akku leuchtet während des Ladevorgangs rot. Der Akku ist betriebsbereit, wenn die Diode am Akku grün leuchtet. Beachten Sie den Benutzerhinweis auf der Rückseite.

Stecken Sie den geladenen Akku in die dafür vorgesehene schwarze Lasche an dem Massagesystem. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit der blauen Anschlussbuchse OUTPUT. Nun blinkt an der Handbedienung unten rechts die grüne Diode. Das Massagesystem ist jetzt betriebsbereit.

Achtung: Die gelbe INPUT-Buchse am Akku ist nur für den Ladevorgang des Akkus.

Taste P3

Startet das Programm Relax.

Anregung des Lymphflusses, Abbau von Stoffwechselprodukten wie Laktat in der Muskulatur, Tiefenentspannung, Abbau von Stress und Gewinnung neuer Energie. Verhindert eine Übersäuerung der Muskulatur (Muskelkater) – schnellere Regeneration.

Taste P2

Startet das Programm Massage.

Tiefenmuskuläre Massage führt zur Linderung von Muskelschmerzen und Auflösung von Verspannungen. Der Stoffwechsel wird angeregt.

Taste P1

Startet das Programm Warm up.

Ideal zum Aufwärmen und Lockern der Muskulatur.

Das Massagesystem schaltet sich nach 15 Minuten ohne Programmwechsel automatisch ab. Nach jedem Programmwechsel läuft das neue Programm wieder volle 15 Minuten.



Taste S

Schaltet die Intensität auf Stufe **SOFT**

Taste M

Schaltet die Intensität auf Stufe **MEDIUM**

Taste I

Schaltet die Intensität auf Stufe **INTENSIV**

Taste Stop

Beendet jederzeit die Anwendung

Die Programme **P1**, **P2** und **P3** starten immer mit der Intensität **SOFT**.

Beim Wechsel zwischen den Programmen **P1**, **P2** und **P3** wird automatisch auf die Stufe **SOFT** zurückgeschaltet.

Die **Dioden 1 – 5** zeigen an, welche Massagezonen gerade in Betrieb sind. Beschreibung der Massagezonen auf der Rückseite.

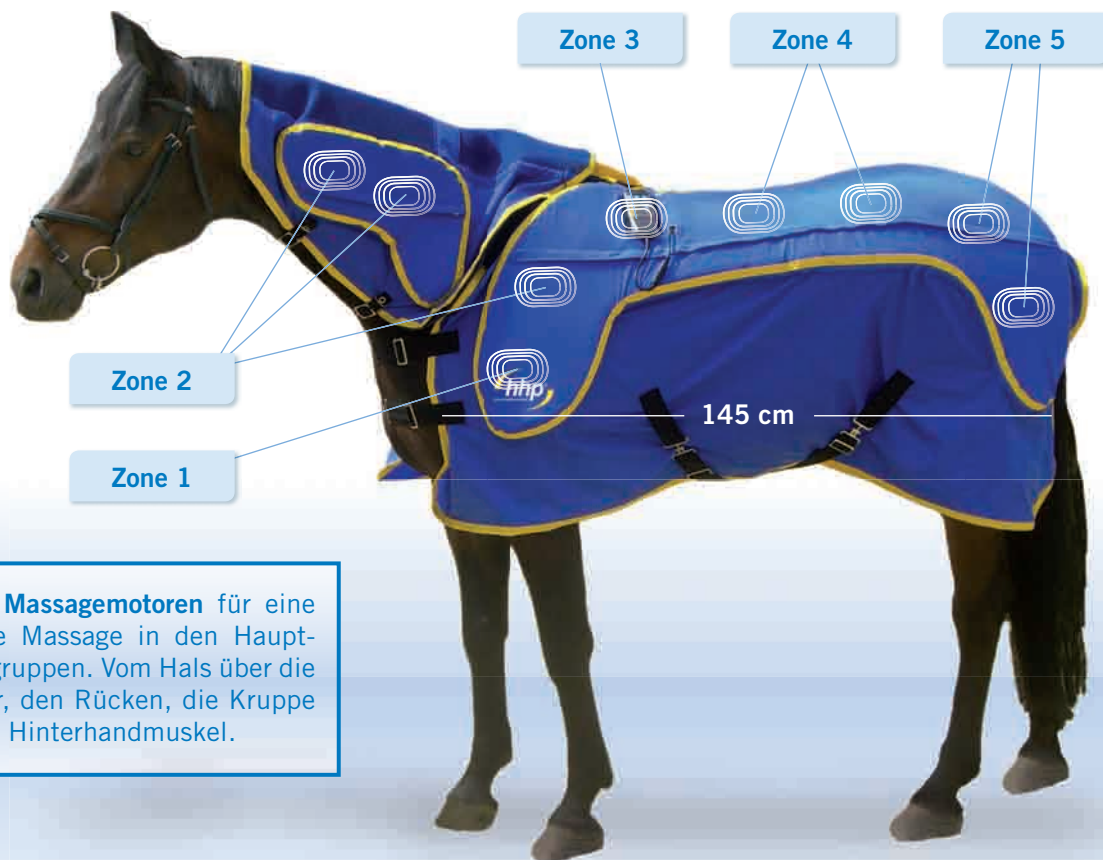
LED AUS zeigt an:

Normales gleichmäßiges Blinken:	Massagesystem betriebsbereit
Blinken im Doppelintervall:	Akkuspannung unter 7,5 V (nur im Standby-Betrieb) Akku muss geladen werden
Dauerleuchten:	Gewähltes Massageprogramm aktiv



Hinweis: Durch Verwendung des mitgelieferten Adapterkabels, kann das Massagesystem auch im Netzbetrieb (also ohne Akku) angeschlossen werden.

hhp Andullationstherapie-System

DAS MASSAGESYSTEM FÜR PFERDE – BENUTZERHINWEISE



Mit 18 Massagemotoren für eine optimale Massage in den Hauptmuskelgruppen. Vom Hals über die Schulter, den Rücken, die Kruppe hin zum Hinterhandmuskel.

Pflegehinweis: DESINFECTIONS-RESISTANT  nicht waschbar  nicht trocknen
 keine Nassreinigung möglich

Zur Gewährleistung einer sicheren und ordnungsgemäßen Funktion des Produktes, verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus. Zur Ladung eines Akkus darf nur das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden!

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku geladen werden. Verbinden Sie dazu den Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät/Netzteil (gelbe Markierung am Kabel zu gelber Input-Buchse, vorher Input Buchse über Schiebschalter öffnen). Der Ladevorgang dauert ca. 3 – 4 Stunden. Die LED am Akku leuchtet grün wenn dieser die maximale Ladung erreicht hat.

Ein voll geladener Akku kann das Massagesystem für mindestens 3 – 4 Zyklen bei maximaler Intensität laufen lassen. Wenn die LED Lampe ROT leuchtet, muss der Akku geladen werden.

Wenn der Akku die maximale Ladung erreicht hat, diesen vom Ladegerät trennen und mit dem Massagesystem verbinden. Öffnen Sie dazu die Output Buchse am Akku.

Etwa während des 3.– 4. Zyklus, bei maximaler Intensität, beginnt die LED-Lampe Output Rot zu leuchten, aber der Akku ist immer noch in der Lage den begonnenen Zyklus zu beenden. Sobald die LED begonnen hat Rot zu leuchten, wird nicht empfohlen einen neuen Zyklus zu beginnen, denn es ist nicht garantiert, dass die Leistung für einen kompletten Zyklus ausreichen wird.